



FecalSwab™

Vorbereitung


- Ein FecalSwab-Set enthält immer ein Medium und einen Abstrichtupfer

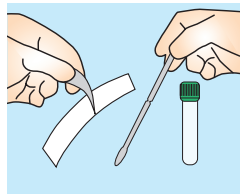


- 1 Entnehmen Sie den Spezialtupfer aus der Verpackung (markierter Bereich). Drehen Sie den Tupfer in der Stuhlprobe, bis er vollständig mit Stuhl bedeckt ist. Alternativ kann der Tupfer ca. 4 cm weit in das Rektum des Patienten eingeführt werden.

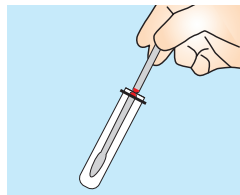

- 2 Drehen und entfernen Sie den Deckel des FecalSwab-Proberöhrchens und achten Sie darauf, das Transportmedium nicht zu verschütten. Führen Sie den deutlich verschmutzten Abstichtupfer soweit in das Röhrchen ein, bis sich die rot markierte Sollbruchstelle auf Höhe der Röhrchenmündung befindet.

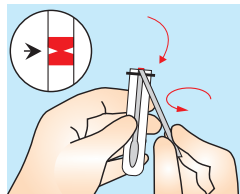

- 3 Brechen Sie den Abstrichtupfer an der rot markierten Sollbruchstelle ab und entsorgen Sie den abgebrochenen Griff des Tupferschafts.

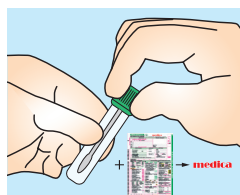

- 4 Verschlussen Sie das Röhrchen gut und achten Sie darauf, dass das Röhrchen korrekt beschriftet ist.


Senden Sie das Röhrchen zusammen mit dem Auftragsformular an **medica**.

Wichtige Hinweise

- Bitte befüllen Sie das Röhrchen nie mit Stuhl
- Bitte verwenden Sie ausschliesslich den im Set enthaltenen Tupfer



FecalSwab™
 Art. Nr. 02001722

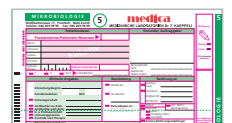

Formular 5
 Mikrobiologie
 Art. Nr. 02001258